

AJ VY MÁTE PACIENTOV S ALERGIU A NEKOMPATIBILITU ?



PURAN HC 35g / 500g

nealergická, teplom polymerizujúca bazálna pasta pre výrobu zubnej protézy. Vyvinutá špeciálne pre alergických pacientov a pacientov s nekompatibilitou. Jednozložková pasta bez pridania methylmethacrylatu a benzoylperoxidu. Jednoduchá technológia. Použiteľné u 95% alergikov. Farba ružová, ružová s vláknami a transparentná.

PURAN HC set

- 1 x 10g Puran HC for testplate
- 1 x 35g Puran HC
- 1 x 10ml Seperator HC (universal)
- 1 x 10ml Aceton



Vhodný pre úplne snímateľné náhrady, čiastočne snímateľné náhrady, imediátne náhrady, opravy. Vhodné pre pacientov citlivých na methyl methacrylate a benzoyl peroxid. Produkt, je kvalifikovaný ako zdravotnícka pomôcka podľa Európskej smernice 93/42 / EHS. Materiálové zloženie : plexiglas , benzoyl peroxide - no phtalathaltigen commodities, oligomer , polyurethane dimethacrylate.

Pasta môže byť polymerizovaná v kyvete, alebo C-silikónovej forme Ruthinium Labor Mass.

Sádru, resp. silikón opakovane naizolujte so Separator Novodent Universal a nechajte vyschnúť. Lisujte pomaly, postupne zvyšujte tlak a niekoľkokrát lisovanie opakujte. Kyvetu vložte na 20min. do vodného kúpeľa zohriateho na 80°C. Potom uveďte vodu do varu a polymerizujte 25min. Puran HC polymerizuje iba vo vriacej vode. Chladenie odporúčame 30min na vzduchu. Neochladzujte kyvetu v studenej vode, vyhnete sa stresovým zlomeniam a prasklinám ! Spojenie s akrylátovými zubami Ruthinium AcryLux odporúčame s vytvorenou retenciou. Rebázie a opravy môžete robiť s Puran CC, acetón slúži na zmáčanie, rozleptanie a očistenie povrchu.



Pre konzistentnú pastovitú a homogénnu formu materiálu je Puran HC pružnejší a s vyššou medzou pevnosti.

Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. Skladovanie: min. +5 °C, max. +25 °C. Chráňte pred deťmi. Zvýšená teplota skladovania skracaie životnosť, naopak, odporúčame skladovanie v chladničke.

INFINITE HORIZONS